

ОДНОРАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ ЩИПЦЫ


COAGRASPER G

Улучшенный захват и функция вращения для надежного и эффективного гемостаза.



ЛЕГКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ЗАХВАТ – ЗАЛОГ НАДЕЖНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ГЕМОСТАЗА.

Проведение эндоскопической диссекции подслизистого слоя (ESD) в желудке требует эффективного и надежного гемостаза в труднодоступных местах. Для дальнейшего совершенствования функций позиционирования и захвата, Olympus разработал новые гемостатические щипцы Coagrasper G с инновационной формой и широким раскрытием бранш, функцией вращения, обеспечивающие надежный гемостаз даже на больших участках твердых тканей и толстых сосудах.

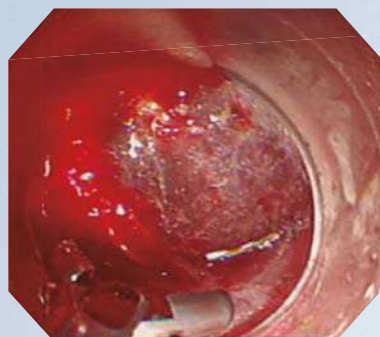

Максимальная ширина раскрытия -6,5 мм

Бранши могут раскрываться на 6,5 мм – оптимальный размер для захвата и достижения гемостаза на больших участках без снижения видимости в поле зрения эндоскопа.




Улучшенная форма бранш

• Безопасный захват

Форма бранш улучшена для безопасного захвата плотных тканей и толстых сосудов.

• Быстрый гемостаз

Толщина бранш была уменьшена для эффективной подачи тока. Электрический ток достигает кончика инструмента в кратчайшие сроки, что способствует быстрому гемостазу.

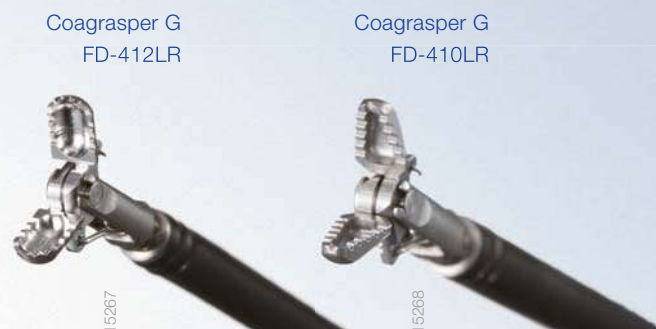

Функция вращения для точного позиционирования

Функция вращения позволяет максимально точно подойти и скоагулировать место кровотечения.



COAGRASPER G

Одноразовые электрохирургические гемостатические щипцы.

- 1 Потяните на себя слайдер ручки для открытия щипцов.
- 2 Вращайте ручку щипцов (по часовой стрелке).
- 3 Захватите щипцами необходимый участок ткани. Медленно коагулируйте.

Запомните: Оттягивание ткани вниз при подключенных щипцах может вызвать перфорацию.

Спецификации	
Модель	FD-412LR
Диаметр канала	Около 2.8 mm
Рабочая длина	1650 mm
Ширина раскрытия	6.5 mm
Функция ротации	✓
Стерильный, одноразовый	✓
Интегрированная ручка	✓



Coagrasper G
FD-412LR



Coagrasper
FD-410LR



Coagrasper
FD-411QR/UR

Характеристики, комплектация и внешний вид указанного оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления и ответственности со стороны производителя.

OLYMPUS

ОЛИМПАС МОСКВА
107023 Москва
ул. Электровзаводская, 27, стр.8
тел./факс +7 495 735 45 78
www.olympus.com.ru

