

# EZ Clip

Система многократного клипирования для надежного гемостаза



## Клипсы и устройства фиксации клипсой для комплексного клипирования

Система наложения клипс Olympus EZ Clip уже давно пользуется заслуженной популярностью среди врачей. И для этого есть веские причины. Функциональные особенности системы, например, возможность поворота клипсы, а также широкий выбор клипс для любой клинической ситуации наделяют ее высокой степенью универсальности. Кроме того, уникальная перезаряжаемая конструкция делает систему очень экономичной.

### Характеристики клипсы

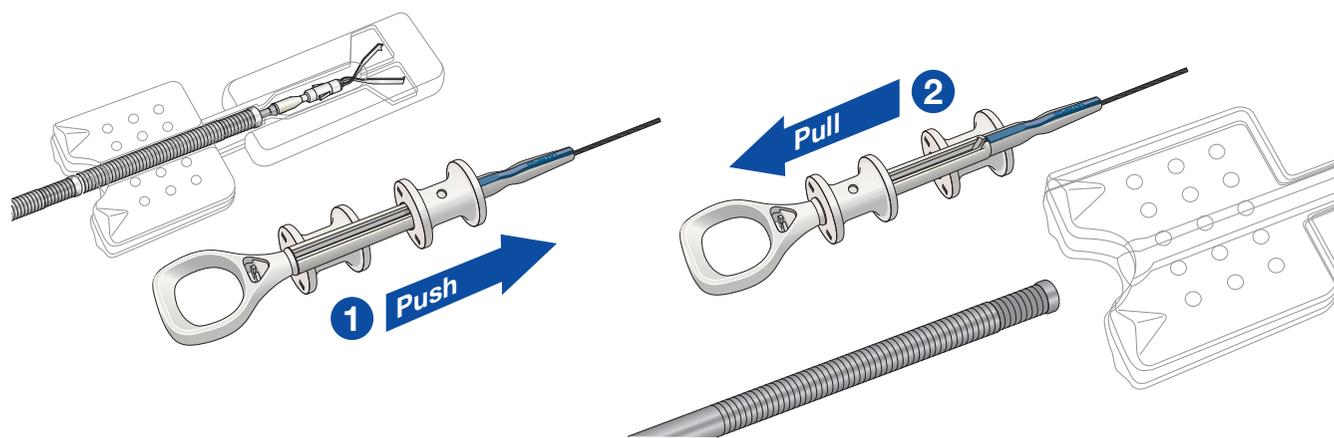
- Быстрое наложение и эффективный механический гемостаз
- Восемь типов клипс EZ Clips для любой ситуации
- Возможность поворота
- Размещение стерильных клипс в картриджах
- Изгиб дистального конца бранши 90° и 135°
- Короткий наконечник
- Тип клипсы можно определить по цвету картриджа, в котором она хранится
- Для наложения данных клипс разработаны два вида аппликаторов



Технические характеристики клипсы				
Номер артикула	Длина клипсы	Преимущества		Изгиб бранши
N2303830	Очень короткая, приibl. 4 мм	Для соединения плотных тканей и закрытия кровоточащих язв		135°
N1085830	Короткая, приibl. 6 мм	Для более прочного клипирования; для наложения на поверхность меньшего размера; для гемостаза плотных очагов		135°
N1085630	Стандартная, приibl. 7,5 мм	Для работы с патологически измененной слизистой оболочкой, глубокими язвенными поражениями, тканями злокачественных новообразований		135°
N2303930	Длинная, приibl. 9 мм	Широкое раскрытие клипсы; для клипирования дефектов после эндоскопической резекции слизистой оболочки и удаления полипов на широкой ножке; для тангенциального закрытия		135°
N1085730	Короткая, приibl. 6 мм	Для маркировки		90°
N1085530	Стандартная, приibl. 7,5 мм	Для работы со здоровой эластичной слизистой оболочкой; при синдроме Мэллори-Вейса; для клипирования открытых сосудов; для закрытия небольших перфораций; для маркировки		90°
N1085930	Длинная, приibl. 9 мм	Для работы со здоровой эластичной слизистой оболочкой; для закрытия крупных очагов; для работы с ножками крупных аденоматозных полипов до и после полипэктомии		90°
N1086030	Короткая, приibl. 6 мм	Специальные клипсы для маркировки; цветная дистальная часть; по 8 белых, красных и желтых клипс в упаковке		90°

### Легкая загрузка с простыми действиями вставки и извлечения

Клипсы помещены в картриджи, обеспечивающие быстроту и удобство загрузки. Все, что нужно сделать, это вставить корпус в картридж, сдвинуть ползунок вперед и вытянуть корпус назад.



### Характеристики аппликатора

Легкая перезарядка клипсы (просто вставить и извлечь) с помощью устройства фиксации клипсы позволяет удобно и эффективно выполнять комплексное клипирование во время одного вмешательства.

- Функция поворота для удобства позиционирования
- Совместимость со всеми изделиями EZ Clip (серия HX-610)
- Три варианта рабочей длины

### Одноразовые

- Исключена необходимость повторной обработки после использования
- Экономичное одноразовое перезаряжаемое устройство фиксации клипс для комплексного клипирования

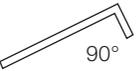
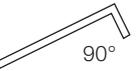
### Для многократного использования

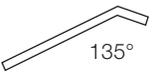
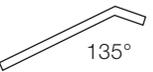
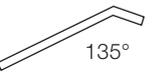
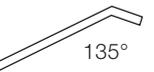
- С возможностью автоклавирования



# Система клипирования EZ Clip

## Технические характеристики клипсы

Сверхкороткая (4 мм) / короткая (6 мм) / стандартная (7,5 мм) / длинная (9 мм)				
Название артикула	<b>HX-610-090SC</b>	<b>HX-610-090S</b>	<b>HX-610-090</b>	<b>HX-610-090L</b>
Номер артикула	N1086030	N1085730	N1085530	N1085930
Угол внешней части бранши	 90°	 90°	 90°	 90°
Длина клипсы	Короткая 	Короткая 	Стандартная 	Длинная 
Цветовая кодировка	 Белый	 Белый	 Желтый	 Синий
Количество в упаковке	24	40	40	40

Название артикула	<b>HX-610-135XS</b>	<b>HX-610-135S</b>	<b>HX-610-135</b>	<b>HX-610-135L</b>
Номер артикула	N2303830	N1085830	N1085630	N2303930
Угол внешней части бранши	 135°	 135°	 135°	 135°
Длина клипсы	Очень короткая 	Короткая 	Стандартная 	Длинная 
Цветовая кодировка	 Серый	 Зеленый	 Розовый	 Фиолетовый
Количество в упаковке	24	40	40	40

## Технические характеристики устройства фиксации клипсой

### Аппликатор одноразового использования



Название артикула	<b>HX-810LR</b>	<b>HX-810QR</b>	<b>HX-810UR</b>
Номер артикула	N5432730	N5432830	N5432930
Совместимый канал	2,8 мм или более		
Рабочая длина	1650 мм	1950 мм	2300 мм
Максимальный диаметр	2,75 мм		
Количество в упаковке	10	10	10

### Аппликатор многоразового использования



Название артикула	<b>HX-110LR</b>	<b>HX-110QR</b>	<b>HX-110UR</b>
Номер артикула	N1085230	N1085330	N1085430
Совместимый канал	2,8 мм или более		
Рабочая длина	1650 мм	1950 мм	2300 мм
Максимальный диаметр	2,7 мм		
Количество в упаковке	1	1	1

 [www.olympus.eu/et-catalog](http://www.olympus.eu/et-catalog)

Технические условия, конструкция и вспомогательное оборудование могут быть изменены производителем без предварительного уведомления или каких-либо обязательств.

**OLYMPUS**

**ООО ОЛИМПАС МОСКВА**

Россия, 107023, г. Москва  
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8  
тел.: +7 (495) 926 70 77  
факс: +7 (495) 926 70 72  
[www.olympus.com.ru](http://www.olympus.com.ru)

Россия, 199178, г. Санкт-Петербург  
3-я линия В.О., д. 62, Лит. А.  
тел.: +7 (812) 385-47-90  
факс: +7 (812) 385-47-93  
[www.olympus.com.ru](http://www.olympus.com.ru)

Украина, 01032, г. Киев  
бул. Т. Шевченко, д. 336  
тел.: +38 (044) 730-21-57  
факс: +38 (044) 594-48-01  
[www.olympus.com.ru](http://www.olympus.com.ru)

Казахстан, 050012  
г. Алматы, ул. Шевченко  
д. 118, оф. 217  
тел.: +7 (777) 399-74-96  
[www.olympus.com.ru](http://www.olympus.com.ru)

M00164RU · 03/19 · NLG